

Ďakujeme, že ste si vybrali najaktuálnejší model automatického nazúvača hygienických návlekov Otto Compact. Tento model je vybavený zásobníkom na 70 – 110ks návlekov, v závislosti od zvoleného typu návlekov.


**Prosím, pred použitím si starostlivo prečítajte všetky inštrukcie.**

## INŠTALÁCIA

1. Postavte sa pred predný kryt stroja - obrázok č.1.
2. Otvorte predný kryt, tak ako to je zobrazené na obrázku č.2.
3. Zoberte oboma rukami jeden balík návlekov, tak ako to je zobrazené na obrázku č.3 a vložte plastové klipy do drážok na oboch stranách smerom dolu. (Ak šírka nie je presná, prosím prispôbte šírku medzi pravou a ľavou stranou plastických klipov.)
4. Stlačte návleky trochu dopredu a držte balík priamo, tak aby ste sa uistili, že plastové klipy sú vložené do drážok, tak ako to je zobrazené na obrázku č.4.



Obrázok č.1

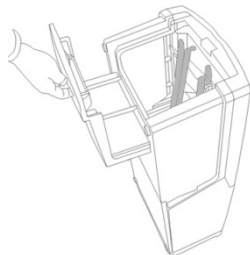

Obrázok č.2



Obrázok č.3




Obrázok č.4

5. Chyťte balík návlekov rukami z oboch strán a zatlačte návleky do vnútra, pokým nie je posledný kus úplne vložený v drážkach až do polohy uzamknutia, tak ako to je zobrazené na obrázku č.5.
6. Rozviažte šnúru, ktorá drží návleky spolu a odstráňte ju tak ako to je zobrazené na obrázku č.6.
7. Odstráňte kartón, tak ako to je zobrazené na obrázku č.7.
8. Na oboch stranách balíka návlekov, odstráňte plastový prúžok, tak že jednou rukou držíte návleky a druhou rukou uchopením plastového krúžku úplne vytiahnete prúžok zo stroja, tak ako to je zobrazené na obrázku č.8.



Obrázok č.5

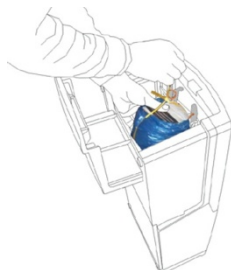

Obrázok č.6




Obrázok č.7




Obrázok č.8

9. Položte zariadenie a potiahnite von prvý návlek zo spodnej kovovej dosky, ako je to zobrazené na obrázku č. 9.
10. Potiahnite prvý návlek pozdĺž drážok až pokým nezapadne na pozíciu držiaka klipov, tak ako to je zobrazené na obrázku č.10
11. Zariadenie je pripravené na používanie, tak ako to je zobrazené na obrázku č.11

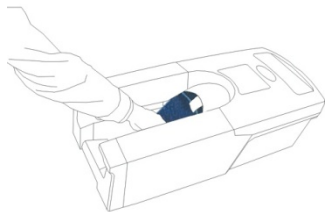

Obrázok č.9

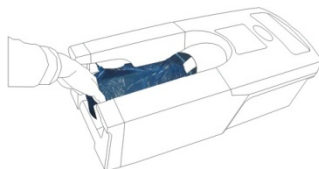

Obrázok č.10



Obrázok č.11

## NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY

### Problém:


Plastové klipy na jednej alebo oboch stranách nie sú vo vnútri drážok, tak ako to je zobrazené na obrázku č.12

### Možné príčiny:

- 1) Počas inštalácie návlekov neboli plastové klipy vložené do vnútra vodiacich drážok.

### Riešenie:

- 1) Uistite sa, že všetky plastové klipy sú vo vnútri drážok, tak ako je to zobrazené na obrázku č.13. Ak nie, zatlačte dolu oba zámky pripojené na drážkach až do ich uvoľnenia. Vyberte návleky, ktorých plastové klipy nie sú vo vnútri drážok a nainštalujte ich správne do drážok.

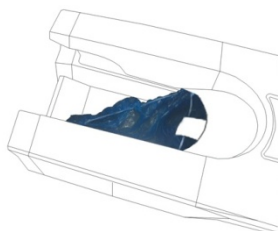

Obrázok č.12



Obrázok č.13

### Problém:


Návlek nie je správne na topánku navlečený, tak ako je to zobrazené na obrázku č. 14

### Možné príčiny:


- 1) Pri ťahaní návleku smerom von zo stroja používateľ príliš vysoko dvíhal prednú časť topánky, čo spôsobilo že topánka nie je vo vnútri návleku, tak ako je to zobrazené na obrázku č.15

## Riešenia:


- 1) Vložte nohu opäť do nazúvača a potiahnite nohu smerom dozadu v horizontálnom smere, tak ako to je zobrazené na obrázku č.16. Dajte dôraz na to, aby bola noha rovno a aby užívateľ nemal dvíhnutú špičku topánky.

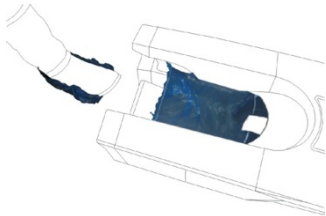

Obrázok č.14

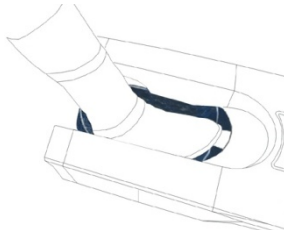


Obrázok č.15

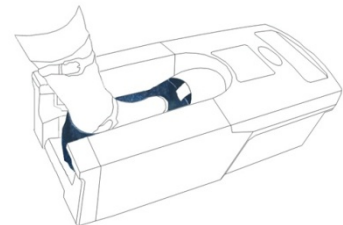


Obrázok č.16

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE


- 1) Vložte nohu do vnútra nazúvača, tak ako to je zobrazené na obrázku č.17
- 2) Potiahnite nohu smerom dozadu vložení vašej päty do návleku, tak ako je to zobrazené na obrázku č.18.
- 3) Pokračujte ťahaním vašej nohy až do uvoľnenia plastových klipov z drážok, tak ako je to zobrazené na obrázku č.19.

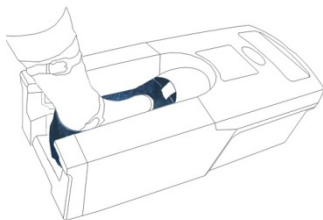

Obrázok č.17

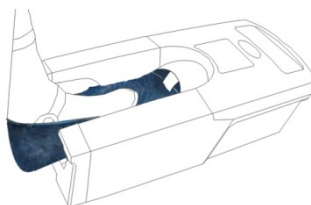

Obrázok č.18

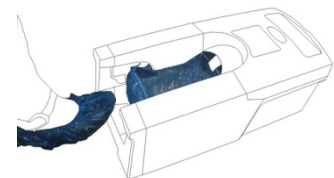


Obrázok č.19

## DÔLEŽITÉ POZNÁMKY


- 1) Prosím, uistite sa, že počas inštalácie návlekov sú všetky plastové klipy vo vnútri drážok, tak ako to je zobrazené na obrázku č.20.
- 2) Počas používania vložte nohu do vnútra návleku a potiahnite návlek smerom dozadu v horizontálnom smere, tak ako to je zobrazené na obrázku č.21. Nezdvíhajte prednú časť chodidla príliš vysoko, pretože noha nie je vo vnútri návleku, tak ako to je zobrazené na obrázku č.22.



Obrázok č.20

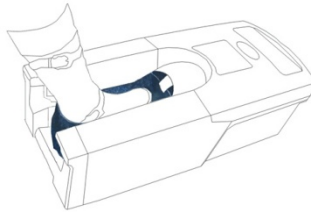

Obrázok č.21

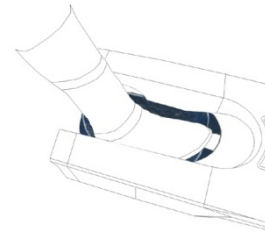

Obrázok č.22

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery zariadenia (dĺžka /šírka/ výška):	70 x 32 x 23 cm
Rozmery balenia (dĺžka /šírka/ výška):	76 x 46 x 66 cm
Váha zariadenia:	10 kg
Váha balenia:	12 kg

## OBSAH BALENIA:

Automatický nazúvač návlekov Otto Compact:	1 ks
Návod na použitie:	1 ks
Kľúč na aretáciu vodiacich drážok	1 ks