

Ďakujeme, že ste si vybrali najaktuálnejší model automatického nazúvača hygienických návlekov Otto Comfort. Tento model je vybavený zásobníkom na 140 – 220ks návlekov, v závislosti od zvoleného typu návlekov.

Prosím, pred použitím si starostlivo prečítajte všetky inštrukcie.

INŠTALÁCIA


1. Otvorte zadný kryt zariadenia a namontujte U-držiak zaskrutkovaním štyroch skrutiek - obr. č.1.
2. Zoberte oboma rukami jeden balík návlekov, tak ako to je zobrazené na obrázku č.2 a vložte plastové klipy do drážok na oboch stranách smerom dolu. (Ak šírka nie je presná, prosím prispôbte šírku medzi pravou a ľavou stranou plastických klipov.)
3. Stlačte návleky trocha dopredu a držte balík priamo, tak aby ste sa uistili, že plastové klipy sú vložené do drážok, tak ako to je zobrazené na obrázku č. 3.
4. Chyťte balík návlekov rukami z oboch strán a zatlačte návleky do vnútra, pokým nie je posledný kus úplne vložený v drážkach až do polohy uzamknutia, tak ako to je zobrazené na obrázku č.4.




Obrázok č.1



Obrázok č.2

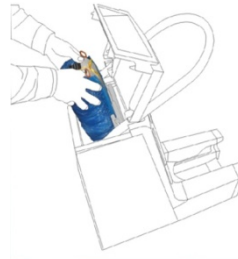


Obrázok č.3

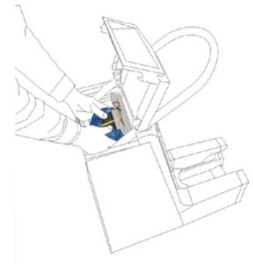


Obrázok č.4


5. Rozviažte šnúru, ktorá drží návleky spolu a odstráňte ju tak ako to je zobrazené na obrázku č.5.
6. Odstráňte kartón, tak ako to je zobrazené na obrázku č.6.
7. Na oboch stranách balíka návlekov, odstráňte plastový prúžok, tak že jednou rukou držíte návleky a druhou rukou uchopením plastového krúžku úplne vytiahnete prúžok zo stroja, tak ako to je zobrazené na obrázku č.7.
8. Zatlačte návleky smerom dole pokiaľ to ide, až dole tak ako to je zobrazené na obrázku č.8

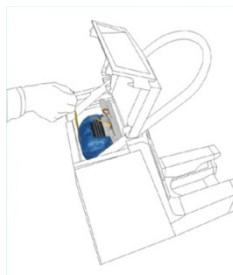

Obrázok č.5

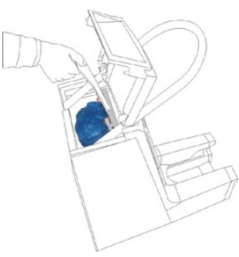

Obrázok č.6

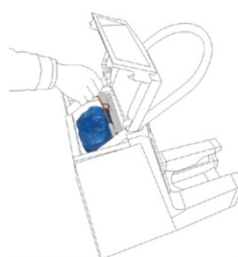

Obrázok č.7



Obrázok č.8

Teraz máte dve možnosti:

Možnosť 1:

9. Zoberte druhý balík návlekov a zopakujte kroky 2-7.
10. Pokračujte v kroku 21.

Poznámka:


Ak si vyberiete Možnosť 1, budete musieť po spotrebovaní prvého balíka návlekov zopakovať krok 8 a kroky 21 až 23 pre druhý balík návlekov.

Možnosť 2:


11. Teraz je potrebné spojiť posledný návlek prvého balíka s prvým návlekom druhého balíka.
12. Vytiahnite posledný návlek prvého balíka hor, tak ako je to zobrazené na obrázku č.9.
13. Stlačte obidva zámky drážok smerom dole a uvoľnite ich, tak ako je to zobrazené na obrázku č. 10.
14. Vyberte plastové úchytky posledného návleku prvého balíka z vodiacich drážok, tak ako je to zobrazené na obrázku č. 11.
15. Odstráňte plastové úchytky z posledného návleku prvého balíka, tak ako je to zobrazené na obrázku č. 12



Obrázok č.9

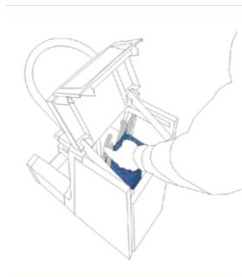

Obrázok č.10

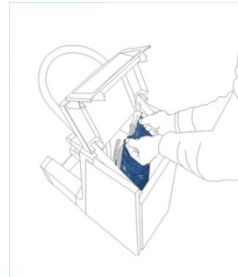

Obrázok č.11




Obrázok č.12

16. Vytiahnite prvú plastovú úchytku na pravej strane druhého balíka návlekov von z plastového prúžku, tak ako je to zobrazené na obrázku č. 13.
17. Pripojte uvoľnenú prvú úchytku druhého balíka návlekov k poslednému návleku prvého balíka návlekov, tak ako je to zobrazené na obrázku č. 14.
18. Založte prvú úchytku druhého balíka návlekov do vodiacej drážky tak, aby bola celá zasunutá v drážke až za zámkom drážky, tak ako je to zobrazené na obrázku č. 15.



Obrázok č.13

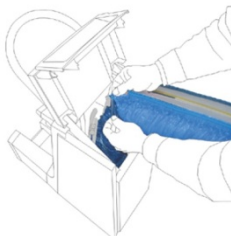


Obrázok č.14




Obrázok č.15

19. Zopakujte kroky 16 až 18 na ľavej strane druhého balíka návlekov.
20. Zopakujte kroky 2 až 7 z druhým balíkom návlekov.
21. Zatvorte kryt a potiahnite von prvý návlek zo spodnej kovovej dosky, ako je to zobrazené na obrázku č. 16.
22. Potiahnite prvý návlek pozdĺž drážok až pokým nezapadne na pozíciu držiaka klipov, tak ako to je zobrazené na obrázku č.17
23. Zariadenie je pripravené na používanie, tak ako to je zobrazené na obrázku č.18

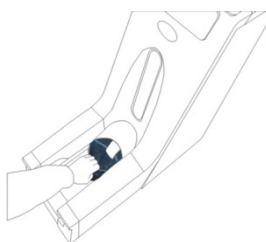

Obrázok č.16

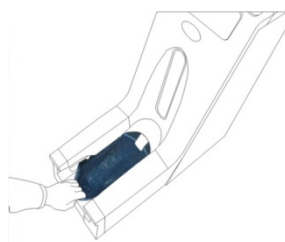

Obrázok č.17



Obrázok č.18

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY

Problém:


Plastové klipy na jednej alebo oboch stranách nie sú vo vnútri drážok, tak ako to je zobrazené na obrázku č.19

Možné príčiny:


- 1) Počas inštalácie návlekov neboli plastové klipy vložené do vnútra vodiacich drážok.

Riešenie:

- 1) Uistite sa, že všetky plastové klipy sú vo vnútri drážok, tak ako je to zobrazené na obrázku č.20. Ak nie, zatlačte dolu oba zámky pripojené na drážkach až do ich uvoľnenia. Vyberte návleky, ktorých plastové klipy nie sú vo vnútri drážok a nainštalujte ich správne do drážok.

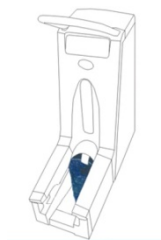

Obrázok č.19

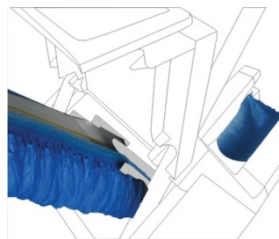

Obrázok č.20

Problém:


Návlek nie je správne na topánku navlečený, tak ako je to zobrazené na obrázku č. 21

Možné príčiny:


- 1) Pri ťahaní návleku smerom von zo stroja používateľ príliš vysoko dvíhal prednú časť topánky, čo spôsobilo že topánka nie je vo vnútri návleku, tak ako je to zobrazené na obrázku č.22

Riešenia:


- 1) Vložte nohu opäť do nazúvača a potiahnite nohu smerom dozadu v horizontálnom smere, tak ako to je zobrazené na obrázku č.23. Dajte dôraz na to, aby bola noha rovno a aby užívateľ nemal dvíhnutú špičku topánky.

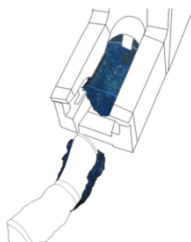

Obrázok č.21

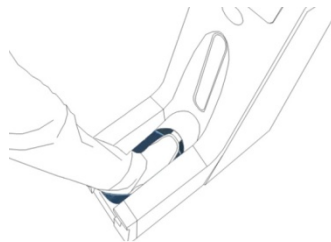


Obrázok č.22

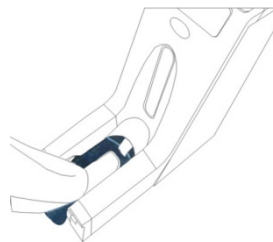

Obrázok č.23

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- 1) Vložte nohu do vnútra nazúvača, tak ako to je zobrazené na obrázku č.24
- 2) Potiahnite nohu smerom dozadu vložením vašej päty do návleku, tak ako je to zobrazené na obrázku č.25.
- 3) Pokračujte ťahaním vašej nohy až do uvoľnenia plastových klipov z drážok, tak ako je to zobrazené na obrázku č.26.

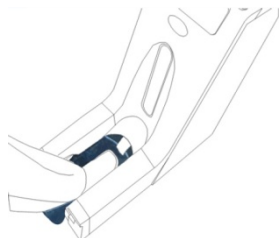

Obrázok č.24



Obrázok č.25



Obrázok č.26

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY


- 1) Prosím, uistite sa, že počas inštalácie návlekov sú všetky plastové klipy vo vnútri drážok, tak ako to je zobrazené na obrázku č.27.
- 2) Počas používania vložte nohu do vnútra návleku a potiahnite návlek smerom dozadu v horizontálnom smere, tak ako to je zobrazené na obrázku č.28. Nezdvíhajte prednú časť chodidla príliš vysoko, pretože noha nie je vo vnútri návleku, tak ako to je zobrazené na obrázku č.28.



Obrázok č.27



Obrázok č.28

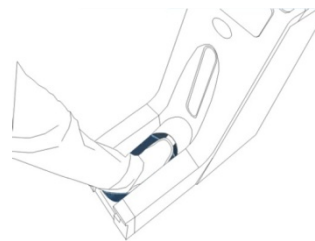

Obrázok č.29

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery zariadenia (dĺžka /šírka/ výška):	74 x 32 x 90 cm
Rozmery balenia (dĺžka /šírka/ výška):	80 x 38 x 80 cm
Váha zariadenia:	21 kg
Váha balenia:	24 kg

OBSAH BALENIA:

Automatický nazúvač návlekov Otto Comfort:	1 ks
U držiak	1 ks
Skrutky:	4 ks
Kolieska:	2 ks
Kľúč na aretáciu vodiacich drážok	1 ks
Návod na použitie:	1 ks