

Romed Shampoo Cap

Šampónovacia čiapka na umývanie hlavy bez použitia vody



Šampónovacia čiapka nahrádza šampón a vodu a je vhodná na použitie ako v nemocniciach a opatrovateľských ústavoch, tak aj pri domácej starostlivosti o chorých a imobilných pacientov. Obsahuje jemný šampón s krémovou konzistenciou (neutrálnym pH). Odporúča sa ju pred použitím zohriať v mikrovlnnej rúre (približne 20 sekúnd pri výkone 700 W). Čiapka sa nasadí na hlavu a jemne masíruje. Šampón sa tak automaticky uvoľňuje a aktivuje, pričom čiapka zároveň absorbuje nečistoty. Po ukončení umývania sú vlasy takmer suché. Použitá čiapka sa nepovažuje za nebezpečný odpad v zmysle platných predpisov. Čiapka je určená na jednorazové použitie a nie je vhodná pre novorodencov ani na umývanie hlavy pri otvorených ranách.

Hlavné účinné látky sú voda, disodium cocoamphodiacetát, glycerín, dimetikón a quaternium-15. Ako konzervačné látky sú použité metylparabén, fenoxietanol a ďalšie. Zvlhčujúce látky obsahujú malé množstvo parfumov.

Obchodné, technické a logistické špecifikácie

	Katalógové číslo	Čiarový kód EAN	Rozmery (cm)	Váha (kg)
Základná predajná jednotka - balíček obsahujúci 1 čiapku	300410	8"717202"437917"	19 x 23 x 1,5	0,20
Kartón – 24 balíčkov	300411	8"717202"437924"	38 x 19 x 23	5,00

Do obchodu

Šampónovacia čiapka na umývanie hlavy bez použitia vody

Výrobca

Van Oostven Medical B.V. – ROMED Holand, Herenweg 269, 3648 CH Wilnis. Holandsko, EÚ